

# 体位変換器

質量  
2.4  
kg

- ・持ち手を引っ張るだけで簡単に体位変換ができます。
- ・家庭用洗濯機で丸洗いOK!



●型式:MTYA ●メーカー:モルテン ●タイプ:まくら型 ●サイズ(cm):全長68×全幅32×厚10

体位変換機+高耐久、マルチ、  
体圧分散式クッション。

## セロリAタイプ

TAISコード:00054-000112 商品番号 F-372A

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

## セロリAタイプを使った上半身を主とした体位変換方法



Aタイプを頭～肩の下に入れておきます。体の向きを変えやすくするために、膝を立てて腕をお腹の上にのせます。



Aタイプの両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。



片側の持ち手を持ち上げるようにして上半身の向きを変えます。立てた膝に手を添えると、より安定した体位変換ができます。



肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向き)にして体位変換完了です。

## Aタイプを使った その他の体位変換方法



下半身の向きを変える



おしりの向きを変える



背中中の向きを変える

- ・持ち手を引っ張るだけで簡単に体位変換ができます。
- ・家庭用洗濯機で丸洗いOK!



●型式:MTYB ●メーカー:モルテン ●タイプ:スネーク型 ●サイズ(cm):全長141×全幅23×厚8

体位変換機+高耐久、マルチ、  
体圧分散式クッション。

質量  
3.1  
kg

## セロリBタイプ

TAISコード:00054-000113 商品番号 F-372B

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

## セロリBタイプを使った上半身を主とした体位変換方法



Bタイプを2つ折りにしてひざの下に入れておきます。体の向きを変えやすくするために、腕をお腹の上にのせます。



Bタイプの両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。



片側の持ち手を持ち上げるようにして下半身の向きを変えます。肩に手を添えると、より安定した体位変換ができます。



肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向き)にして体位変換完了です。

## Bタイプを使った その他の体位変換方法




2つ折りで上半身の向きを変える



体全体の向きを変える



L字で上半身の向きを変える

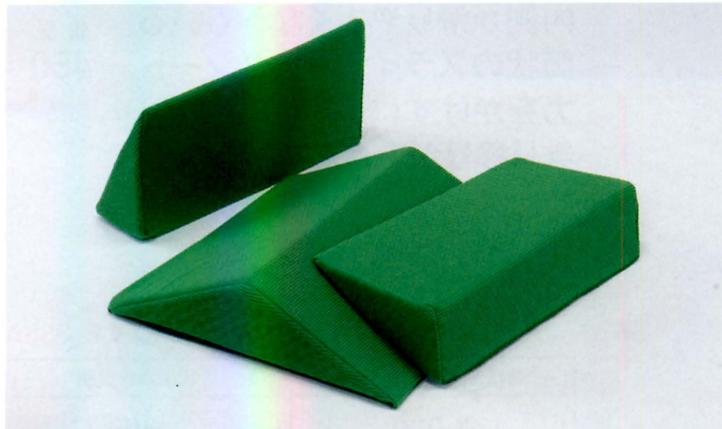

身体の下に差し込むだけで容易に体位変換ができ、そのまま良肢位を保持します。

質量 **850g**  
大

質量 **450g**  
小

ナーセントパットA

TAISコード:00149-000012 商品番号 F-371A

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
<b>2,500</b>	<b>250</b>

●型式:ナーセントパットA ●メーカー:アイソネックス ●組合せ:大ピース×1、小ピース×2  
●サイズ(cm):(大)幅40×長さ40×高さ10、(小)幅20×長さ40×高さ10

側臥位(横向き)で ●2Pを使用して



腹臥位(腹這いで)




仰臥位(仰向け)で ●2Pを使用して



オムツ交換

パットを重ねて60°の側臥位に。

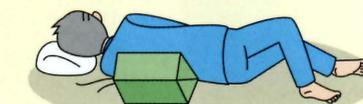

ベッド上で ●3Pを使用して




車いす上で

車いすの横倒れ防止



車いすの姿勢調整に

後傾した骨盤の支持に

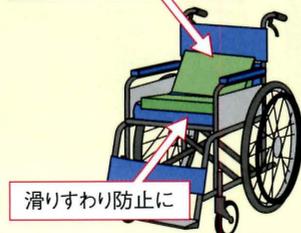


※薄手のクッションと併用してご使用ください。




こんな使い方も

下肢の外旋防止

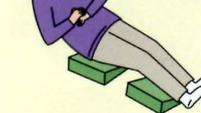

3Pを組み合わせて背上げ30°



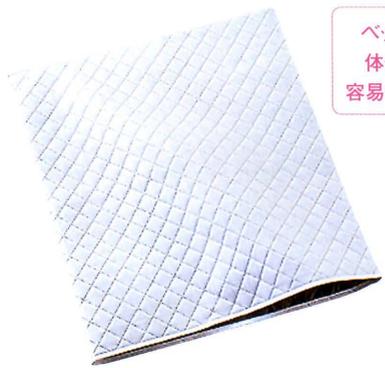

ベッド上での  
体位変換が  
容易に行えます。

内側が滑りやすくなっている筒状のスライディングシート。力をかけずに、移動、乗り移りができます。

質量  
450g

ノルディックスライド(ミディ)

TAISコード:00130-000024 商品番号 F-366A

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

●型式:ノルディックスライド(ミディ)

●メーカー:パシフィックサブライ ●サイズ(cm):全長80×全幅72

使い方の参考例 ★ベッド上のズレを元に戻す方法

(1)ギャッジを使用しない場合



(2)ギャッジを利用する場合



テコの原理で簡単に体位変換。スウィング機能はリハビリに利用できます。

質量  
950g

ライトターンC(コンパクトタイプ)

TAISコード:00149-000017 商品番号 F-367A

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

●型式:ライトターンC ●メーカー:アイソネックス ●サイズ(cm):巾40×高39×奥行13

使用方法



ライトターンの中央隔壁を足先のほうに向けて倒し、凹部に乗せます。



ライトターンを回転させて起こし、両膝を両側の凹部に入れます。




まずライトターンのベルトを持って回転させ、肩も少し押しながら寝返りを行います。



股間を開いた状態を保持できますので、おむつ交換や排便が容易に行えます。

質量  
約300g

ベッド上でサイドレールなどに固定すると、側臥位の一時的な保持ができるので「おむつ交換」などを楽に、より安全に行うことができます。

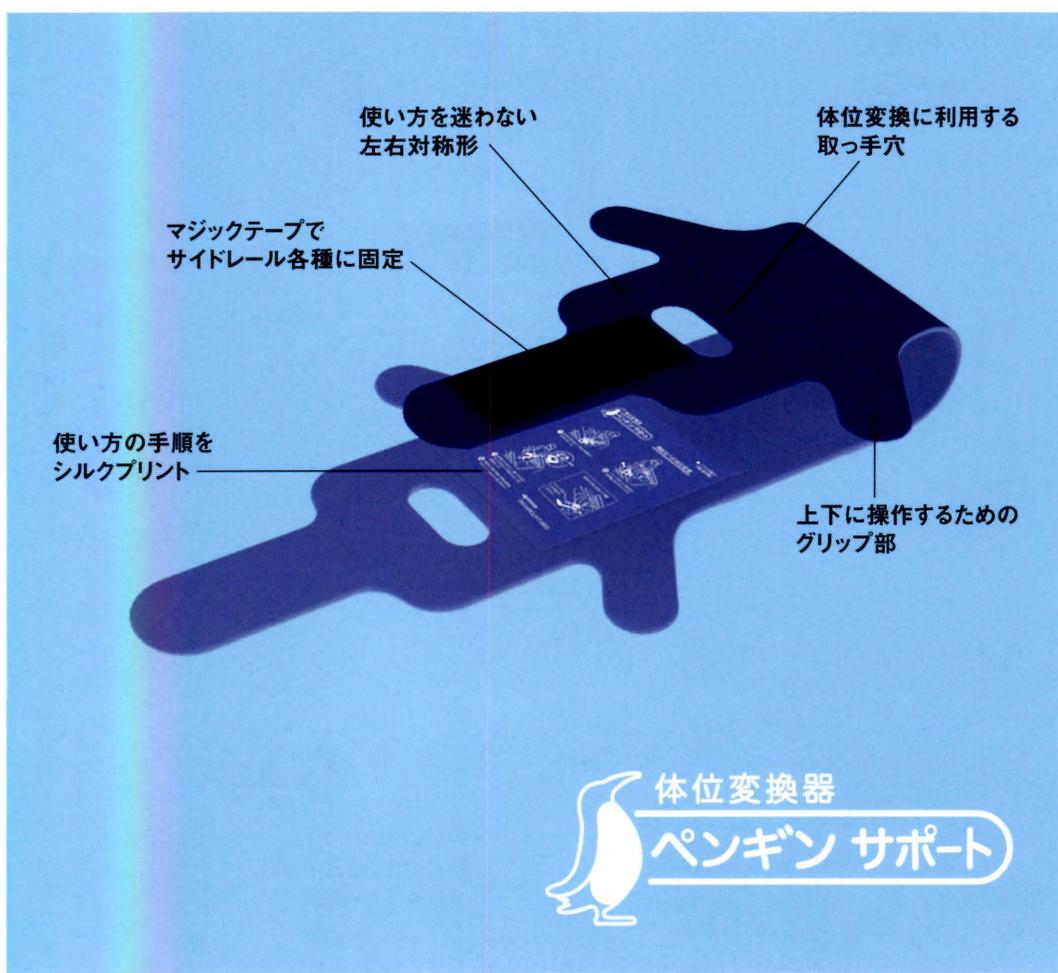

ペンギンサポート 使用手順のご紹介



- **側臥位の一時的な保持**  
固定部(面ファスナー)で、ベッド用オプション(ベッドサイドレール・スイングアーム介助バー・折りたたみベッドサイドレール)へ簡単に固定することができるので、側臥位の一時的な保持ができます。
- **セッティングのし易さ**  
身体の下に差込み易くするために、滑りやすい材質を使用しています。
- **清潔維持**  
撥水加工を施しました。清拭や消毒、手洗いなどで清潔にお使いいただけます。 ※日常のお手入れは取扱説明書をご確認ください。

体位変換器 ペンギンサポート

TAISコード:00170-000713 商品番号 F-368A

- 型式:KE-100S
- メーカー:パラマウントベッド ● サイズ(cm):全長約163×全幅約48
- 最大使用者体重(kg):138

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150